



ROSE
БРЕКЕТ-СИСТЕМА

РАЗБОР КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ

Клинический случай подобрала и описала

Бойкова Екатерина Игоревна, К. М. Н.

Специализация — ортодонтия, детская стоматология.

Екатерина Бойкова — практикующий врач-ортодонт, кандидат медицинских наук, доцент кафедры детской стоматологии с курсом ортодонтии СГМУ и активный участник обучающих семинаров и мастер-классов, а также автор книги «Ортословарь» и организатор учебных онлайн-марафонов для коллег.

Стаж работы по специальности «ортодонтия» — более 15 лет.



Разбор клинических случаев



Случай 1


Пациентка А. — применение брекет-системы **ROSE**
для выравнивания положения зубов,
осложненного прогнатическим прикусом

Исходное состояние

- Жалобы на неровные зубы.
- Открытый прикус – контакт на 7-х зубах.
- Прямая дуга улыбки.
- Тортоаномалия зубов.
- Дистальное нижнее положение н. ч.
- Ротация н. ч. по часовой стрелке







До лечения

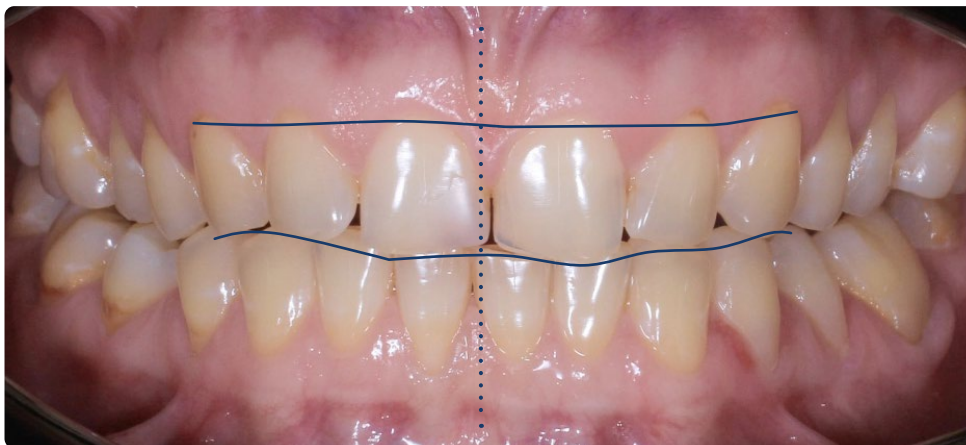

Тортоаномалия зубов; открытый прикус – контакт на 7-х зубах.




Исходное состояние

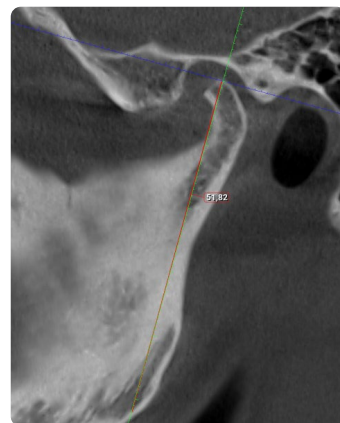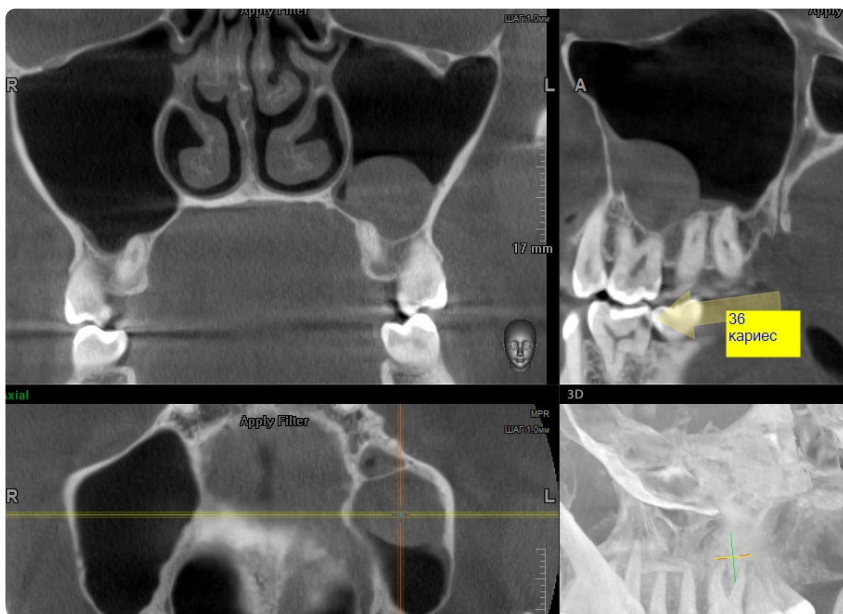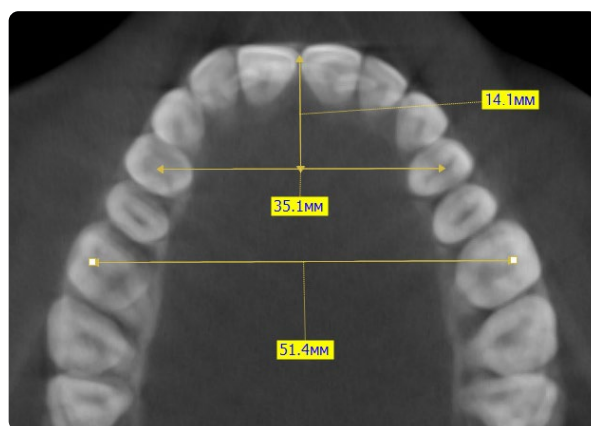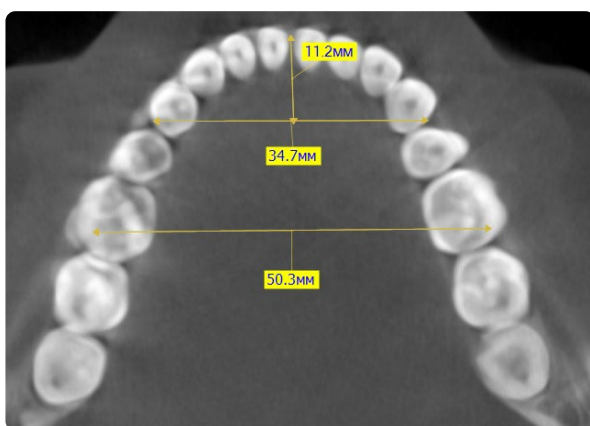

Дистальное нижнее
положение н. ч.

Исходное состояние

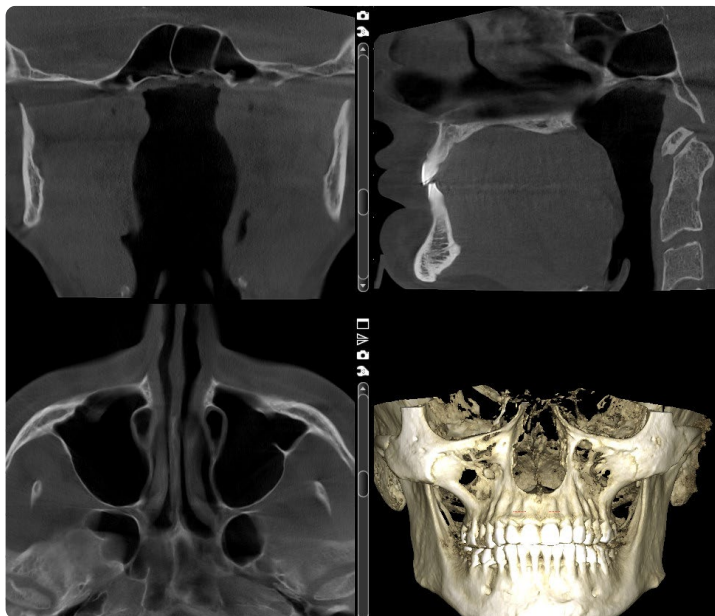






Планируется Двучелюстная брекет-система.

- Расширение в области премоляров в.ч. и н.ч.
- Нормализация положения зубов (поворот по оси 45) и взаимоотношения челюстей.
- В процессе лечения: накладки (возможны), межчелюстные эластики (обязательны).

Дыхательные пути и миндалины в норме



Ротация н.ч. по часовой стрелке

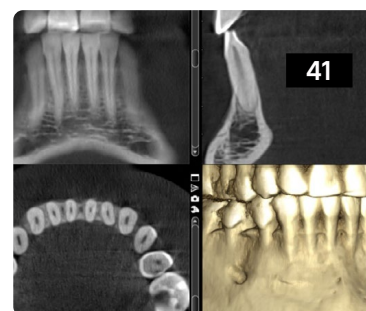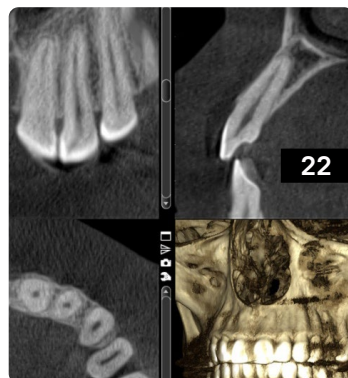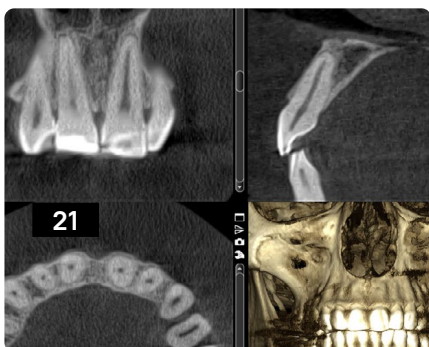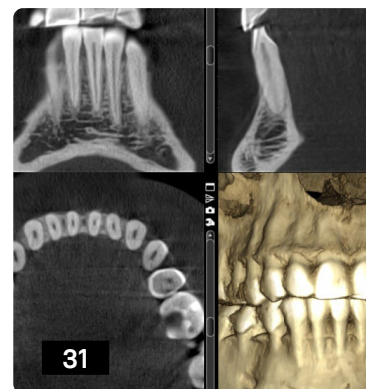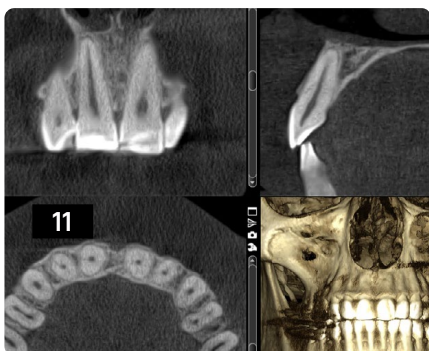

План ортодонтического лечения

- Предварительное удаление зуба 38 обязательно.
- Удаление зуба 48 желательно.
- Лечение кариеса 36.
- Фиксация брекет-системы избегая резцов первоначально.
- Ротировать н. ч. против часовой стрелки: движение вверх и вперед — легкие эластики с начальных дуг по 3 классу + накладки на 6 для их вколачивания.
- Подключение в систему резцов в. ч. и н. ч.
- КТ-контроль через 6-8 мес. лечения — костная ткань в области резцов + положение сустава.
- Окончательная детализация положения зубов и прикуса.

Начало лечения

Фиксация.



Состояние через 3 мес после начала лечения



Состояние через 4 мес после начала лечения



Исходное состояние



Через 4 мес после начала лечения




Состояние через полгода после начала лечения



Исходное состояние



Через полгода после начала лечения

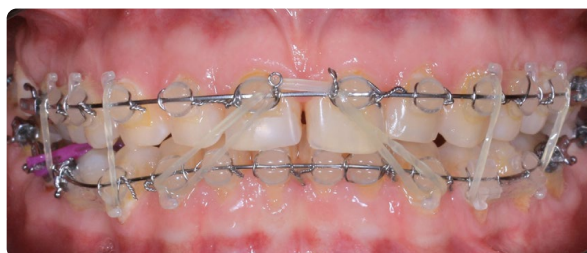

Состояние через 7 мес после начала лечения



Исходное состояние



Через 7 мес после начала лечения



Состояние через 8 мес после начала лечения



Исходное состояние



Через 8 мес после начала лечения



Состояние через 9 мес после начала лечения



Исходное состояние



Через 9 мес после начала лечения



Состояние через год после начала лечения




Через полгода после начала лечения



Через год после начала лечения



Состояние через год и мес после начала лечения

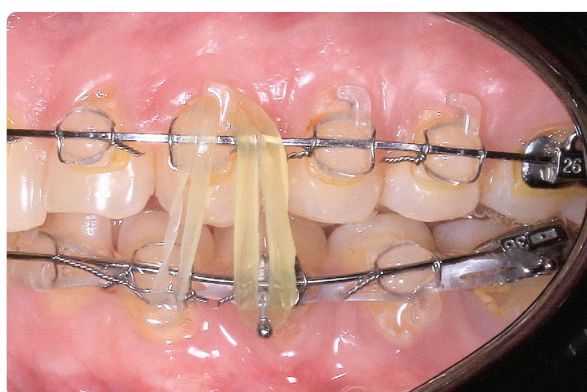

Исходное состояние



Через год и мес после начала лечения




Состояние через год и 2 мес после начала лечения



Исходное состояние



Через год и 2 мес после начала лечения

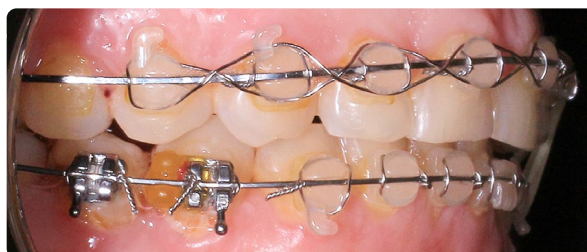

Снятие системы через 15 мес после начала лечения



Результат достигнут с помощью брекетов керамических лигатурных и дуги i-arch



Исходное состояние



Через 15 мес после начала лечения



Исходное состояние





Состояние через 15 мес после начала лечения



Исходное состояние




Через 15 мес

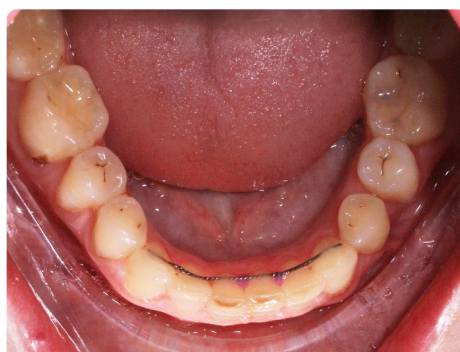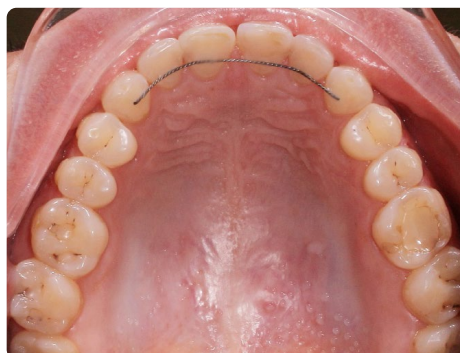

Снятие системы через 15 мес после начала лечения



До лечения

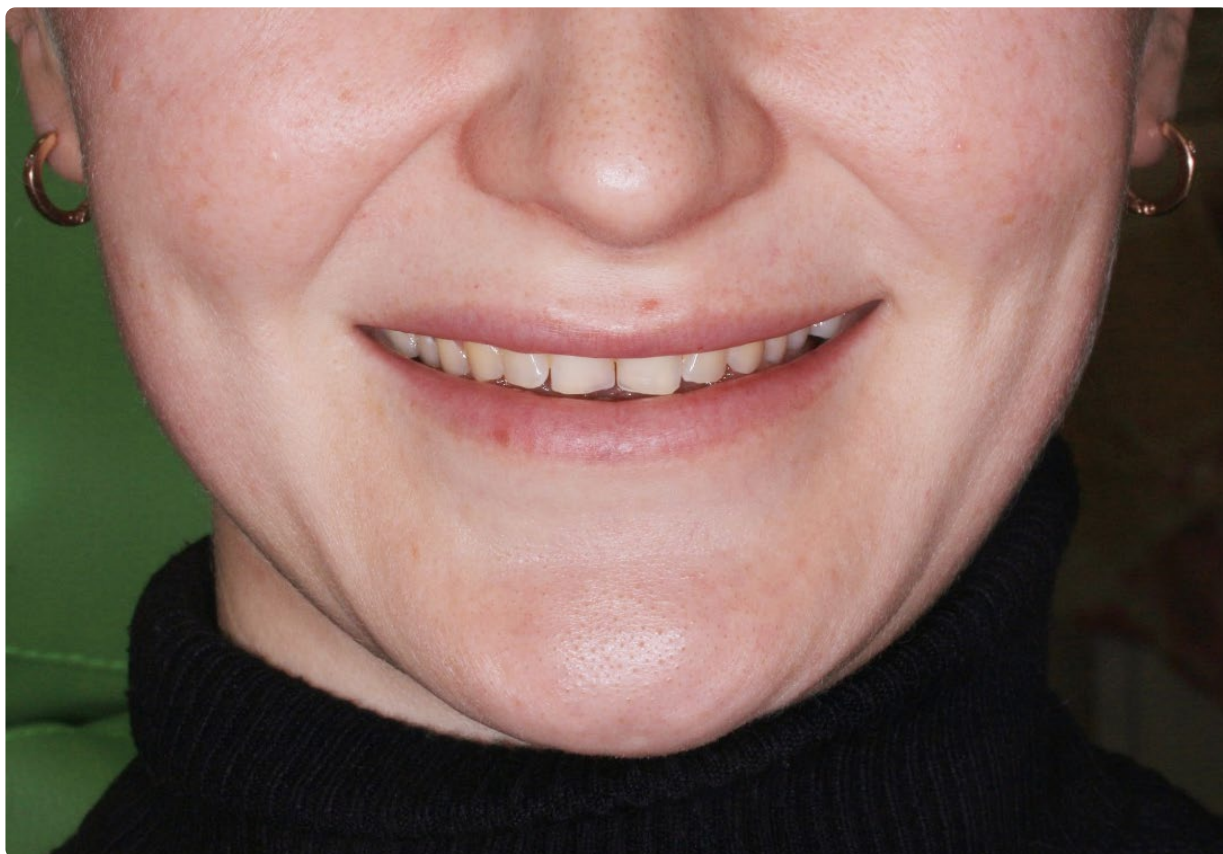

Состояние через 15 мес после начала лечения



О компании GNI ORTHO

Компания GNI Co., Ltd. это южнокорейский производитель современной и актуальной ортодонтической продукции, известной и востребованной на международном стоматологическом рынке.

Продукция бренда GNI Co., Ltd. хорошо знакома специалистам в Азии, на Ближнем востоке и в Европе. Дистрибуция продукции производится через 9 региональных офисов в Китае и более чем 20 официальных представительств по всей Азии.

Начиная с 2006 года GNI Co., Ltd. активно развивается в направлении повышения качества ортодонтической продукции. Результатом является постоянный рост популярности бренда и объема продаж на международном рынке.

Перед запланированным выходом на стоматологический рынок России и началом мероприятий по получению регистрационных удостоверений, продукция бренда GNI Co., Ltd. прошла апробацию отечественными ортодонтами и получила положительные отзывы. Далее были успешно пройдены все необходимые лабораторные испытания и получены регистрационные удостоверения от Росздравнадзора РФ.

Первыми в 2024 году были презентованы ортодонтические анкерные винты SMART ANCHOR. Продукция получила регистрационное удостоверение №РЗН 2024/22299 от 26.03.2024.

В 2025 году были получены регистрационные удостоверения на брекет-системы под номером №РЗН 2025/25022 от 18.03.2025, замки (щечные трубки) №РЗН 2025/25085 от 31.03.2025 и дуги №РЗН 2025/25037 от 20.03.2025.

GNI Co., Ltd. стремится обеспечить высочайший уровень качества продукции, что отражает твердое намерение компании завоевать и поддерживать доверие клиентов в России. GNI Co., Ltd. Желает вам добиться большего совершенства в поставленных целях в будущем.

Вдохновляйтесь вместе с GNI!



Тел.: +7 (499) 652-77-10
Эл. почта: info@gniortho.ru

gniortho.ru